




# BD Vacutainer® Push Button -siipineula kiinteällä ohjaimella


## Käyttöohje ja hävitys

### Pakkauksen avaaminen ja pistäminen

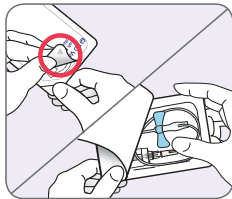


**1a** Avaa pakkaus vetämällä kulman nuolesta, jolloin siipineula paljastuu.

**1b** Tartu siipineulan runkoon peukalolla ja keskisormella. Nosta neula pakkauksesta ja varo painamasta aktivointipainiketta.

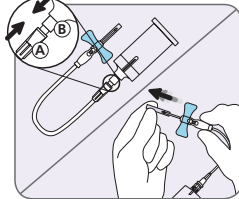


**2a** Varmista, että naaraspuolinen Luer-liitin (A) on kunnolla kiinni vastaliittimessään (B).


**2b** Irrota neulan suojus.

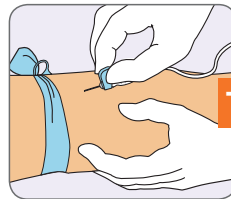

**3a** Purista siivekkeet peukalon ja etusormen avulla yhteen. Työnnä neula suoneen tavalliseen tapaan.

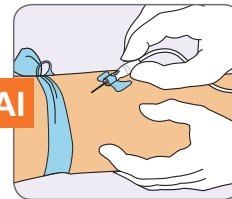


**3b** Siivekkeiden sijaan voit laitoksenne käytännön mukaisesti tarttua myös siipineulan runko-osaan.

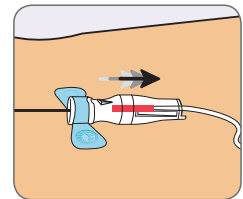


**4** Suonen löytyminen näkyy veren virtauksena siipineulaan.

TAI


### Neulan poistaminen suonesta

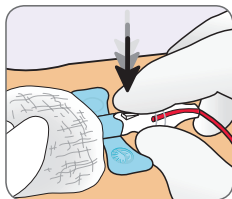


**5a** Turvallisuuden varmistamiseksi tuote aktivoidaan neulan ollessa edelleen potilaan laskimossa. Aseta harsolappu pistokohdan päälle. Jätä siipineulan rungon etuosa sen alle. Tartu siipineulaan peukalolla ja keskisormella neulan ollessa edelleen laskimossa. Paina painiketta etusormella. Älä käytä peukaloa.

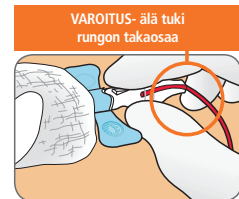


**5b** Katso, että neula voidaan poistaa esteettä pitämällä sormet ja kädet etäällä siipineulan takaosasta.

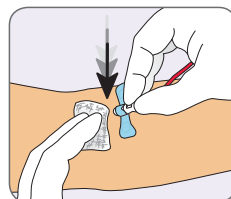

**6** Paina pistokohtaa laitoksenne käytännön mukaisesti.

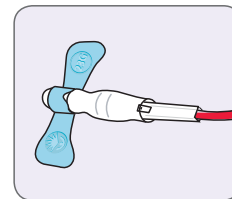

**7** Ennen hävittämistä varmista, että neula on vetäytynyt kokonaan sisään.

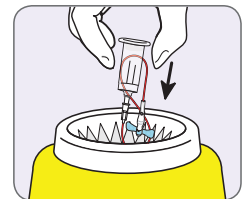

**8** Hävitä tuote ohjaimen kanssa laitoksenne käytännön mukaisesti.

