

Pikakäyttöohje



1 Poista suojakalvo kyvetin päältä. Varo läikyttämästä puskuria. Tarkista, että nestepinta on kahden kyvetissä olevan viivan välissä. Älä koske kyvetin alaosaan.



2 Laita mäntä kapillaarin oranssilla merkittyy pään. Ota näytettä (10 µl) kapillaarin valkoiseen "stopperiin" saakka. Varmista, ettei kapillaarissa ole ilmakuplia. Pyyhi ylimääräinen näyte pois kapillaarin ulkopinnalta.



3 Lisää näyte (10 µl) kyvetin puskuriliuokseen painamalla mäntä pohjaan. Varmista, että kapillaari tyhjäntyi kokonaan.



4 Sulje kyvetti huolellisesti wrCRP-reagenssikorkilla. Älä paina korkin turkoosia sisäosaa alas. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.



5 Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä "Mittaus".



6 Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin. Mittauksen etenemistä voi seurata näytöltä.



7 Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle, ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammiosta. QuikRead go wrCRP+Hb -testin Hb-tulos näkyy CRP-tuloksen alapuolella.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

Reagenssien säilytys



Reagenssipakkaus

Avaamaton pakkaus 2–25 °C:n lämpötilassa: säilyy pakkauksen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka



Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen

Säilytys 2–8°C: 6 kuukautta

Säilytys 18–25°C: 3 kuukautta



Reagenssikorkit avaamattomassa tai avatussa putkilossa

Avaamaton putkilo 2–25°C: pakkauksen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka

Avaamisen jälkeen 2–25°C: 6 kuukautta



Avattu kyvetti

Testi tulee tehdä kahden (2) tunnin kuluessa kyvetin avaamisesta. Anna puskurin lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen testin suorittamista. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.



CRP-kontrollit (katso taulukko alla)

Avaamattomat pullo 2–8°C: viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka

Avattu pullo 2–8°C: enintään 2 kuukautta



Hb-kontrolli (katso taulukko alla)

Avaamaton pullo 2–8°C: viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka

Avattu pullo 2–8°C: enintään 1 kuukausi

Tuote	Tuotenumero	Tilausnumero Mediq Suomi Oystä
QuikRead go wrCRP, 50 testiä » sisältää kapillaarit (10 µl) ja männät	146521	1701126
QuikRead go wCRP+Hb, 50 testiä » sisältää kapillaarit (10 µl) ja männät	146255	1701127
QuikRead go wrCRP kontrolli 1 ml	153038	1702752
QuikRead go wrCRP kontrolli High 1 ml	153039	1702753
Ultrasensitive CRP kontrolli 1 ml	68257	68257
QuikRead go Hb 10 µl kontrolli 1 ml	153656	1702845
QuikRead go 10 µl kapillaarit, 50 kpl	147851	1701128
QuikRead männät, 50 kpl	67966	67966
QuikRead go -laite	135867	–



Orion Diagnostica Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B, PL 83
02101 Espoo
www.oriondiagnostica.fi, www.quikread.com

8046-05FI, 10/2018

Tilaukset: Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510
Lisätietoja tuotteista: e-mail: suomi@oriondiagnostica.fi