

Metalline®-taitokset



Metalline®-taitos

OHUESTI ALUMIINILLA PÄÄLLYSTETTY HAAVATYYNY.

IHOA MYÖTÄILEVÄ, HAAVAA SUOJAAVA, EI TARTU HAAVAAN, HYVÄ LÄPÄISYKYKY.

OMINAISUUDET

Metalline-taitoksen haavaa peittävä puoli on huokoista, pehmeää kuitukangasta, jonka kuidut on ohuesti päällystetty alumiinilla. Tämä hyvin sileä pinta on inerti verelle ja haavaeritteille, se ei tartu haavaan. Haavaeritteet imeytyvät heti taitoksen imukykyiseen kerrokseen ja haavan puhdistuminen tehostuu. Alumiinipinta ja imukerros, jotka on kiinnitetty tiiviisti toisiinsa, läpäisevät hyvin ilmaa ja vesihöyryä. Metalline-taitokset on steriloitu tai ne voidaan steriloida (autoklaavi 121 °C).

KÄYTTÖ

Taitoksia käytetään kaikenlaisten haavojen peittämiseen traumatologiassa, kirurgiassa, ihotaudeissa ja laskimosairauksissa. Metalline asetetaan metallipäällysteinen puoli haavaan päin ja kiinnitetään hieman taitosta venyttäen.

Jauheet tai voiteet ehkäisevät eritteiden imeytymistä, ja niitä tulisi välttää. Koska Metalline-taitokset eivät tartu haavaan, sidoksen vaihto tapahtuu kivuttomasti, mikä vaikuttaa positiivisesti tervehtymisprosessiin.

TUOTETIEDOT

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö/tukkupakkaus
Steriili, yksittäispakattu peel-open-kuoreen			
61079	23083	8 x 10 cm	10/560 kpl
	23084	10 x 12 cm	10/300 kpl
Steriloimaton			
58273	23080	5 m x 10 cm	1/20 kpl

Metalline® -trakeostomiataitos

REIÄLLINEN JA AUKILEIKATTU.


NOPEA JA SIISTI HAAVANHOITO TRAKEOSTOMIAKANYYLII- JA DREENISIDOKSIIN, EI TARTU HAAVAAN.

OMINAISUUDET

Taitos, joka tähdenmuotoisesti reiän ympärille leikattujen viiltojen ansiosta asettuu tiiviisti haavan ympärille. Metalline-taitoksen haavaa peittävä puoli on huokoista, pehmeää kuitukangasta, jonka kuidut on ohuesti päällystetty alumiinilla. Tämä hyvin sileä pinta on inertti verelle ja haavaeritteille, se ei tartu haavaan. Haavaeritteet imeytyvät heti taitoksen imukykyiseen kerrokseen ja haavan puhdistuminen tehostuu. Alumiinipinta ja imukerros – tiiviisti toisiinsa kiinnitettynä – läpäisevät molemmat hyvin ilmaa ja vesihöyryä. Metalline-taitokset on steriloitu tai ne voidaan steriloida (autoklaavi 121 °C).

KÄYTTÖ

Metalline-trakeostomiataitokset on leikattu valmiiksi haavan peittämiseksi henkitorvi- ja munuaisavanteissa ja paksukaliiperisissa kanavoinneissa. Taitokset kiinnitetään kiiltävä puoli haavaan päin. Ne pitävät haavan alueen kuivana ja vähentävät siten tulehdusvaaraa. Metalline ei tartu haavaan; sidoksen vaihto tapahtuu kivuttomasti.

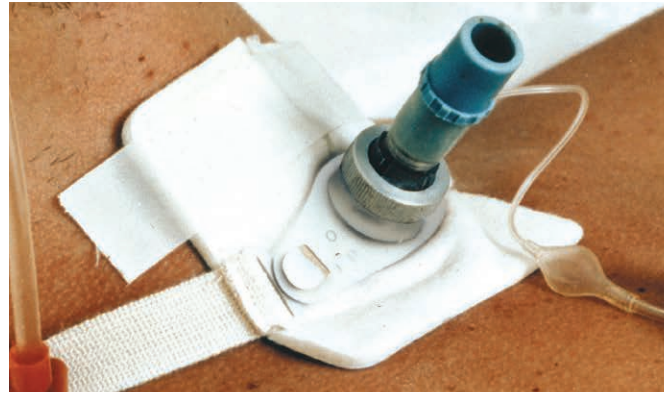

TUOTETIEDOT

Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Leveys	Myyntiyksikkö/tukkupakkaus
Steriili, yksittäispakattu peel-open-kuoreen			
61647	23094	8 x 9 cm	50/600 kpl

Reiän läpimitta: 12–19 mm, ch 31–50

Metalline® -dreenitaitos

REIÄLLINEN JA AUKILEIKATTU.

NOPEA JA SIISTI TAITOS DREENI- JA PIIKKIVETOSIDOKSIIN, EI TARTU HAAVAAN.

OMINAISUUDET

Taitos, joka tähdenmuotoisesti reiän ympärille leikattujen viiltojen ansiosta asettuu tiiviisti haavan ympärille. Metalline-taitoksen haavaa peittävä puoli on huokoista, pehmeää kuitukangasta, jonka kuidut on ohuesti päällystetty alumiinilla. Tämä hyvin sileä pinta on inertti verelle ja haavaeritteille, se ei tartu haavaan. Haavaeritteet imeytyvät heti taitoksen imukykyiseen kerrokseen ja haavan puhdistuminen tehostuu. Alumiinipinta ja imukerros – tiiviisti toisiinsa kiinnitettynä – läpäisevät molemmat hyvin ilmaa ja vesihöyryä.

KÄYTTÖ

Metalline-dreenitaitokset on leikattu valmiiksi dreeni-, infuusiokatetri- tai piikkivetohaavojen peittämistä varten. Taitokset kiinnitetään metallipuoli haavaan päin. Ne pitävät haavan kuivana ja vähentävät siten tulehdusvaaraa. Metalline ei tartu haavaan; sidoksen vaihto tapahtuu kivuttomasti.



TUOTETIEDOT

Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Leveys	Myyntiyksikkö/tukkupakkaus
Steriili, yksittäispakattu peel-open-kuoreen			
61646	23093	6 x 7 cm	50/600 kpl

Reiän läpimitta: 4,5–11 mm, ch 9–30

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi