


Uusi BD Vacutainer® Eclipse™ Signal™

Käyttöohje




Helping all people
live healthy lives

BD Vacutainer® Eclipse™ Signal™ verinäytteenottoneula ohjaimella

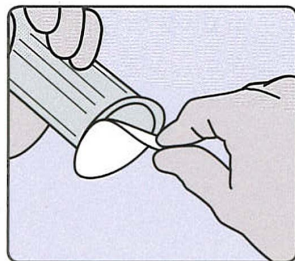


1 Laita suojäkäsineet käsiisi. Poista ohjaimen suojakalvo. Tuote on heti käyttövalmis – osat ovat valmiiksi yhdistetty toisiinsa.

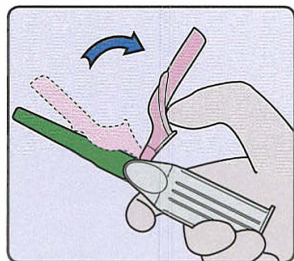


2a Käännä neulan turvasuojus taaksepäin ohjainta vasten.


2b Poista neulan värillinen suojus kiertämällä. Huomaa, että neulan kärjen aukko ja leikkauspinta ovat turvasuojuksen kanssa samansuuntaiset. Näin ollen neula on valmiiksi oikeassa asennossa verinäytteenottoa varten. **ÄLÄ** kierrä tai pyöritä turvasuojusta.

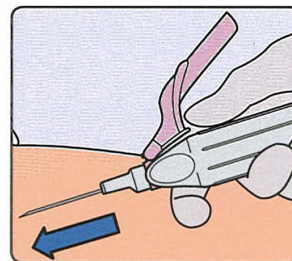


3 Suorita verinäytteenotto paikallisten ohjeiden mukaisesti.

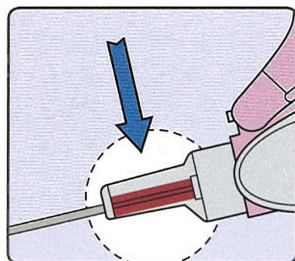

4 Neulan kammioon virtaava veri näyttää neulan oikean sijainnin laskimossa.

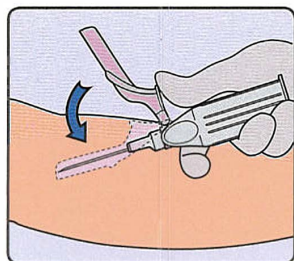

5 Poista näytteenoton jälkeen neula laskimosta. Paina peukalollasi turvasuojus neulan päälle. Suojus napsahtaa lukituessaan. **ÄLÄ** aktivoi turvasuojusta painamalla sitä kovaa alustaa vasten.

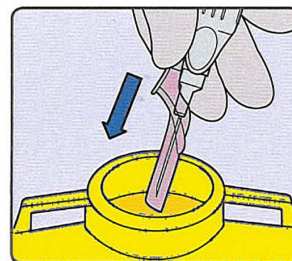

6 Laita käytetty turvaneula ja ohjain välittömästi pistävälle jätteelle tarkoitettuun riskijäteastiaan.



Mediq Suomi Oy
Riihitontuntie 7 D, PL 115
02201 Espoo, puh. 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi