

# Oksennuspussiteline

## Yksinkertainen käyttää

- Yleiskiinnitys ruuveille, sopii kaikkiin edellisiin / olemassa oleviin kiinnikkeisiin
- Rako josta näkee pussien määrän telineessä
- Helppo puhdistaa pyyhkimällä, sietää kaikkia terveydenhuollossa tavallisimmin käytettyjä puhdistusaineita
- Helppo täyttää, pussit pysyvät varmasti paikoillaan ja ne on helppo vetää ulos kevyellä nykäisyllä
- Teline on kierrätettävä ja sillä on paras ympäristöluokitus 'SundaHus –rekisterissä'
- Telineeseen mahtuu 50 tai 25 pussia




Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk
601133K	Annosteluteline suuri (n. 50 pussia)	1/5
601131K	Annosteluteline pieni (n. 25 pussia)	1/10

Os.pakk = pienin toim.erä



Materiaali: kierrätettävä PP  
 Kestää etanolipohjaisia pesuaineita  
 Kestää lämpöä +120° C  
 Valmistaja:  
 Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)


# MEDI PLAST

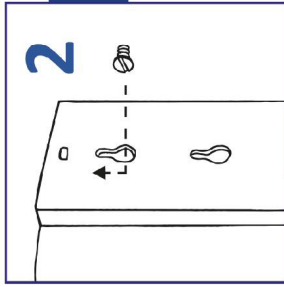

2

1 & 2

Kiinnitä ruuvit seinään ja aseta teline paikoilleen. Reijät telineessä sopivat aikaisempien telineiden ruuveihin, riippumatta niiden koosta tai valmistajasta.

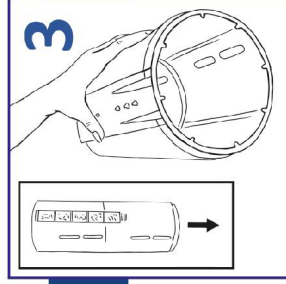

3

3.


Aukko, jossa on kahdeksan korvaketta, pitää suunnata alaspäin, jotta annostelija toimii oikein.



4

4.


Täyttövaiheessa on huomioitava että pussi sijoitetaan oikein päin.

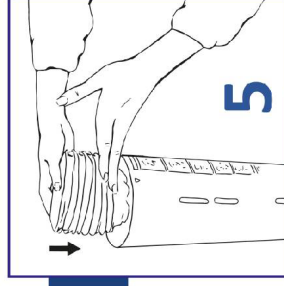

5

5.

Oksennuspussit eline täytetään ylhäältä.

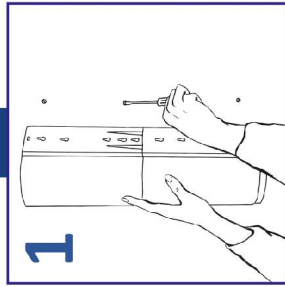

1

6

6.

Vedä pussi telineestä kevyellä nykäisyllä.

Telineen asennus

Puh 09 276 360  
asiakaspalvelu@mediplast.com  
www.mediplast.com

Yhteystiedot lisätietoa varten