


BD Vacutainer® Safety-Lok™ Siipineula

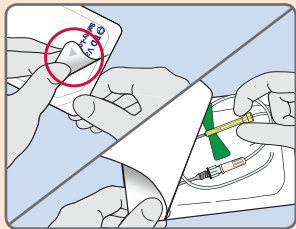


1a Käytä suojäkäsineitä.


Avaa tuotepakkaus nuolen osoittamasta kohdasta.

1b Tartu siipineulaan peukalo-etusormi-otteella ja poista tuote pakkauksesta.


1c Liitä siipineulaan kertakäyttöinen BD Vacutainer® ohjain.

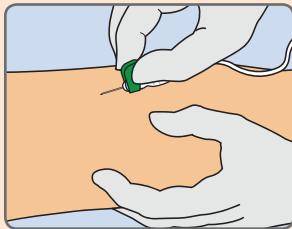


2 Pidä kiinni siipineulasta painamalla siipiä vastakkain etusormi-peukalo-otteella. Poista neulansuojus ja suorita laskimoverinäytteenotto paikallisten ohjeiden mukaisesti.

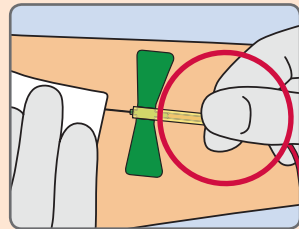

3 Pidä kiinni neulan otekohtasta, turvasuojuksen takaosasta peukalo-etusormi-otteella. Vedä neula pois suonesta. Paina pistoskohtaa paikallisten ohjeiden mukaisesti.

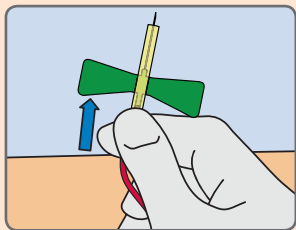

4 Paina letkua käden vapaana olevilla sormilla kämmentä vasten. Aktivoi peukalolla ja etusormella turvasuojus liu'uttamalla suojusta eteenpäin, kunnes suojus peittää neulan kärjen. Turvasuojus on paikallaan kun kuulet napsahduksen.

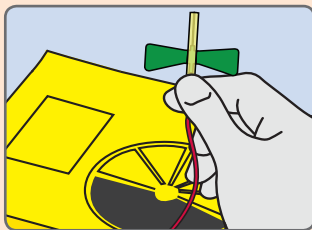

5 Hävitä siipineula asianmukaiseen riskijäteastiaan turvamekanismin aktivoinnin jälkeen. Hävitä sekä neula että kertakäyttöinen ohjain irrottamatta niitä toisistaan. Noudata valmistajan antamia ohjeita neulan irrottamiseksi ohjaimesta mikäli et käytä kertakäyttöistä ohjainta.



Mediq Suomi Oy
Riihitontuntie 7 D, PL 115
02201 Espoo, puh. 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi



BD Diagnostics
Preanalytical Systems