

Steriking® Daily test -pakkaus DCG2



Jos sterilointiprosessissa on ilmanpoistovaihe, jolla varmistetaan höyryn tasainen tunkeutuminen steriloitavaan kuormaan, höyrynläpäisytesti on suoritettava joka päivä ennen tuotannon aloittamista standardin SFS-EN 285 mukaisesti.

Standardin SFS-EN ISO 11140-1 luokan 2 testi ajetaan tyhjässä, esilämmitetyssä kammiossa sen alimmalla tasolla käyttäen automaattista Bowie-Dick -testi-ohjelmaa.

Mediqn tuotenumero 10015709.

Standardin SFS-EN ISO 11140-4 mukaisen DCG2-pakkauksen sisällä oleva laminoitu testiarkki muuttuu tasaisen tummaksi altistuttuaan 134 °C höyrylle 3,5 minuutin ajan. Jos testipakkaukseen jää ilmaa, jolloin värin muutos ei ole tasainen voi syynä olla tehoton ilmanpoistovaihe, ilmavuoto ilmanpoistovaiheessa tai höyryn sisältämät tiivistymättömät kaasut.

STERIKING®



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

