



Steriking® Multi Seal Test Kit

Seuraa saumauslaitteesi toimintaa sekä sauman eheyttä dokumentoidusti.

Testipakkaus sisältää tarvittavat komponentit yhden saumaajan yhden vuoden seuranta varten.

- Seal Control -saumaustestejä 300 kpl
- 80 ml pullo väriainetta pipetillä testausta varten
- Kello ajanottoa varten
- Seurantakortti dokumentointia varten
- Käyttöohjeet (englanninkieliset)

TESTIPAKKAUSTA KÄYTETÄÄN

- Päivittäiseen seurantaan visuaalisesti, että sauma on yhtenäinen ja eheä.
- Viikoittaiseen todentamiseen väriaineen avulla, että sauma on ehjä.

VIIKOITTAISEN TESTAUKSEN OHJEET

- Testaa saumaaja viikoittain.
- Tee testausauma Seal Control -saumaustestille.
- Avaa väriainepullo ja tiputa noin 30-40 tippaa sauman leveydelle varovaisesti.
Huom! Väriainesta tarttuu pintoihin tiukasti, joten suojaa työskentelyalustasi.
- Anna väriaineen vaikuttaa 5 sekuntia (kello ajanottoa varten mukana).
- Tarkista ajan kulumisen jälkeen, onko saumassa kohtia, mistä väriaine on päässyt läpi.
Näin ei tulisi käydä ehjän sauman kanssa.
- Dokumentoi tulokset!

Mediqn tuotenumero 10016228.

STERIKING®



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

