

Miellyttävän helppo asettaa paikoilleen ja irrottaa



TIETOA TUOTTEESTA

ADAPTIC™ DIGIT kiinnittymätön sormi- ja varvassidos on tehty ainutlaatuisesta tarttuvasta silikonipäälysteisestä kankaasta, jonka päällä on putkisiide. Se on erityisesti suunniteltu sormien ja varpaiden sitomiseen.



Käyttömukava

ADAPTIC™ DIGIT ei kiinnity haavaan. Se on muovautuva ja pienikokoinen, joten se mahdollistaa sormien ja varpaiden mahdollisimman suuren taipuisuuden.



Helppo asettaa paikoilleen ja irrottaa


ADAPTIC™ DIGIT on nopea ja helppo asettaa paikoilleen; asetinta tai saksia ei tarvita. Sidos irtoaa helposti haavasta, mikä minimoi vauriot¹.

KÄYTTÖOPAS

Ennen käyttöä

Lue käyttöohjeet. Valitse ADAPTIC™ DIGIT -sidos sormen tai varpaan koon mukaan. Valmistele haava sopivan haavanhoitomenettelyn mukaisesti. Varmista, että haavaa ympäröivä iho on kuivaa. Ota ADAPTIC™ DIGIT -sidos pois laatikosta.

Sidoksen valmistelu

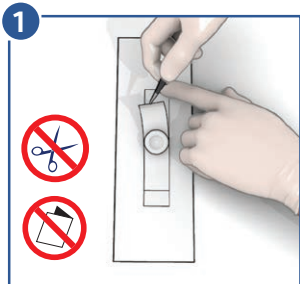


1. Revi kaksi pakkauksen puolta erilleen aseptista tekniikkaa käyttäen.
2. Irrota **ADAPTIC™ DIGIT** -sidos kiiltävästä tukiliuska.

Sidoksen asettaminen paikoilleen



1. Aseta ensisijainen kiinnittymätön silikonikerros sormen tai varpaan kärjen päälle ja tasoita varovasti vaurioituneen ihon päälle.
2. Vedä putkisivoksen alemmaa rengasta alaspäin ensisijaisen liuskan päälle (ja tarpeen mukaan toissijaisen sidoksen päälle).
3. Tee sama ylemmälle renkaalle muodostaaksesi suojaavan kaksinkertaisen putken.

Sidoksen vaihtaminen ja irrottaminen

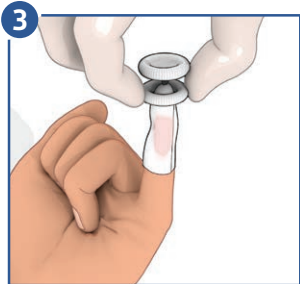

Hyvä haavanhoitokäytäntö määrää sidoksen vaihtotiheyden, joka riippuu haavan tilasta. **ADAPTIC™ DIGIT** voidaan jättää paikoilleen usean vuorokauden ajaksi.

1. Vedä putkisivoksen ylärengasta varovasti ylöspäin ja toista sama toisen renkaan kohdalla.
2. Irrota varovasti kiinnittymätön kerros haavanpohjasta ja hävitä sidos.

Saatavilla myös varpaille



KÄYTTÖTARKOITUS

ADAPTIC™ DIGIT -sidos on tarkoitettu lievien – vaikea-asteisten sormi- tai varvasvammojen hoitoon, kuten:

- Laseraatiot ja abraasiot
- Traumavammat
- Kynsien irtoamiset
- Ommelsaummat

ADAPTIC™ DIGIT -sidosta voidaan käyttää sekä ensisijaisena että toissijaisena sidoksena².

Hyvä tietää...

Kliinisessä arviointitutkimuksessa

96%

potilaista piti ADAPTIC™ DIGIT -sidoksen irrottamista helppona tai erittäin helppona¹

ADAPTIC™ DIGIT		
Koko	Sidoksia/laatikko	Systagenixin koodi
Small 2 cm Ø	10	MAD003
Medium 2,4 cm Ø	10	MAD013
Large 2,8 cm Ø	10	MAD023
Extra large 3 cm Ø	10	MAD042

ADAPTIC™ DIGIT VARVASSIDOS		
Koko	Sidoksia/laatikko	Systagenixin koodi
2,8 cm Ø	10	MAD062

Lisätietoja ADAPTIC™ DIGIT -sidoksen hyödyistä saat ottamalla yhteyden Systagenixin myyntiedustajaan numeroon **020 112 1510** tai käymällä osoitteessa systagenix.com



Mediq Suomi Oy
Riihitontuntie 7 D, PL 115
02201 Espoo, puh. 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi