


Pitkäkestoista antimikrobista suojaa



TIETOA TUOTTEESTA

SILVERCEL™-hydroalginatisidos on steriili kuitukangastyyny, joka sisältää alginaattia, karboksimeetyliselluloosaa (CMC) ja hopeapäälysteisiä nailonkuituja.

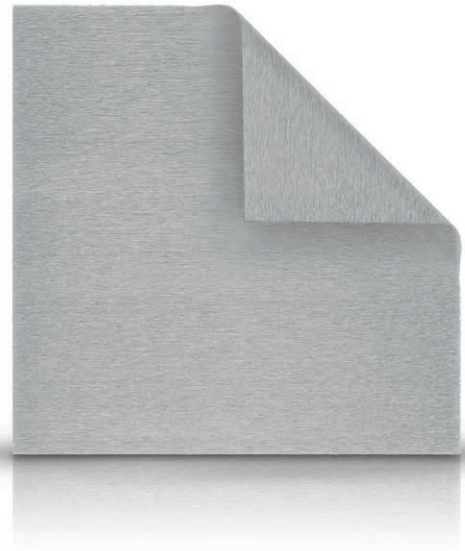

Tulehdusnesteen hallinta

SILVERCEL™ minimoi maseraation ja vuodon riskin, ja sen on osoitettu imevän ja pidättävän tulehdusnestettä myös kompressiotilassa^{1,2}. Sidoksen vetolujuus lisääntyy 56 %:lla, kun se on kontaktissa haavan tulehdusnesteen kanssa¹, joten sidos voidaan irrottaa ehjänä.



Antimikrobinen vaikutus


SILVERCEL™ vapauttaa hopeaioneja pitkäkestoisesti, jopa 7 päivän ajan. Tämä mahdollistaa tehokkaan antimikrobisen suojan koko käyttöajalle, tulehdusnesteen määrästä riippuen^{1,3,4}.

KÄYTTÖOPAS

ENNEN KÄYTTÖÄ


Lue käyttöohjeet. Valitse hieman haavan kokoa suurempi SILVERCEL™-sidoksen koko. Valmistele haava sopivan haavanhoitomenettelyn mukaisesti. Varmista, että haavaa ympäröivä iho on kuivaa.

Sidoksen valmistelu

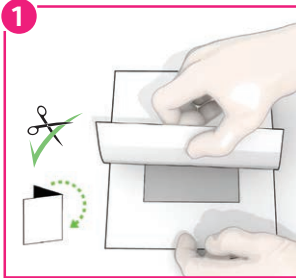

1. Ota pussi laatikosta.
2. Leikkaa SILVERCEL™ -sidosta tarvittaessa puhtailla saksilla tai taita sidosta, jotta se mukautuu haavaan.

Sidoksen asettaminen paikoilleen

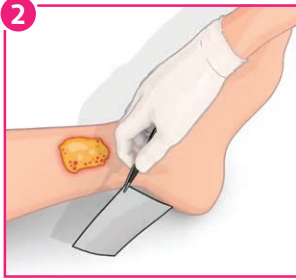

1. Peitä syvät haavat kevyesti ja varmista samalla, että sidos ei ole haavan reunojen päällä.
2. Kun haavan tila paranee ja tulehdusnesteen määrä vähenee, kostuta sidosta normaalilla keittosuolaliuoksella ennen käyttöä.

Toissijaisen sidoksen paikalleen asettaminen



1. Peitä ja kiinnitä SILVERCEL™ sopivalla ei-okklusiivisella toissijaisella sidoksella, kuten jollakin TIELLE™-hydropolymeerisidosten valikoiman sidoksella.

Sidoksen vaihtaminen ja irrottaminen



1. Aseta SILVERCEL™ uudelleen paikalleen, kun toissijaisen sidoksen imukyky on käytetty tai mikäli hyvät haavanhoiton käytännöt edellyttävät sidoksen vaihtamista.
2. Irrota varovasti toissijainen sidos. Jos haava vaikuttaa olevan kuiva, kostele sidos normaalilla keittosuolaliuoksella ennen irrottamista.
3. Irrota varovasti sidos haavanpohjasta ja hävitä se. Huuhtelee haavakohta ennen uuden sidoksen asettamista.

KÄYTTÖTARKOITUS

SILVERCEL™ on tarkoitettu kohtalaisesti tai voimakkaasti tulehdusnestettä erittävien, kolmannen asteen kroonisten haavojen hoitoon, mukaan lukien:

- painehaavat
- säärilaskimohaavat
- diabeettiset säärihaavat
- luovutuskohdat, trauma- ja leikkaushaavat

Koska tuote sisältää alginaattia, se voi auttaa pinnallisten haavojen lievän verenvuodon hoidossa.



SILVERCEL™-sidosta voidaan käyttää kompressiosidosten alla⁵, ja se on tehokas sekä kuivana että keittosuolaliuoksella esikostutettuna⁶



Kliinisen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että SILVERCEL™ voi olla tehokas myös vaikeasteisten palovammojen hoidossa. Se hoitaa sekä tulehdusnesteen että veriseerumin tilannetta ja edistää kosteaa, haavaa parantavaa ympäristöä⁷

SILVERCEL™		
Koko	Sidoksia/laatikko	Systagenixin koodi
5 cm x 5 cm	10	CAD050
11 cm x 11 cm	10	CAD011
10 cm x 20 cm	5	CAD020
2,5 cm x 30,5 cm	5	CAD230

Lisätietoja SILVERCEL™-sidoksen hyödyistä saat ottamalla yhteyden Systagenixin myyntiedustajaan numeron **020 112 1510** tai käymällä osoitteessa **systagenix.com**



Mediq Suomi Oy
Riihitontuntie 7 D, PL 115
02201 Espoo, puh. 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi