

BIOSORB™
GEELIYTYVÄ KUITUSIDOS

GEELIYTYVÄ
KUITU JOKA
SÄILYTTÄÄ
MUOTONSA
LOPPUUN ASTI


KÄYTTÖOPAS

Ennen käyttöä

Lue käyttöohjeet.


Puhdista haava huolellisesti. Haavaa ympäröivän ihon on oltava puhdas ja kuiva. Ota pussi laatikosta.

Sidoksen valmistelu

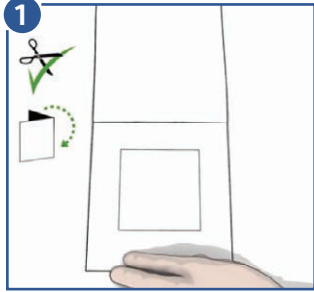

1. Sidoksen koko on valittava ja sitä on leikattava tarpeen mukaan siten, että se peittää haavan reunat noin 1 cm:n leveydeltä. Pidä tuote poissa haavan luota oikeaan kokoon leikattaessa.


Sidoksen asettaminen paikoilleen

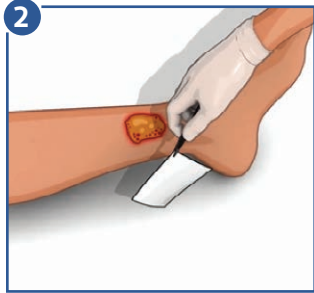

1. Aseta sidos kosteaan haavaan siten, että se peittää haavan reunat noin 1 cm:n leveydeltä. Jos tulehdusnestettä on vähän, kostuta sidos steriilillä fysiologisella keittosuolaliuoksella (0,9 %).

2. Käytä nauhaversiota syvien haavojen hoitoon. Aseta sidos kevyesti haavaan ja jätä sitä noin 2,5 cm leveydeltä haavan reunojen päälle irrottamisen helpottamiseksi.

Toissijaisen sidoksen paikalleen asettaminen

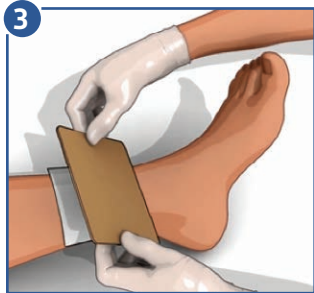

1. Käytä soveltuvaa toissijaista sidosta tuotteen paikoillaan pitämiseksi.

Sidoksen vaihtaminen ja irrottaminen



1. Sidos on vaihdettava, kun se on hoidollisesti aiheellista (esim. kun sidoksen imukyvyyn rajat ovat tulleet vastaan tai kun hyvä haavanhoitokäytäntö edellyttää sidoksen vaihtoa).

2. Jos sidos kiinnittyy haavaan, jossa on vähäinen määrä tulehdusnestettä, kostuta sitä steriilillä fysiologisella keittosuolaliuoksella (0,9 %) ennen sidoksen vaihtamista, jotta paranemisprosessi ei häiriinny. Kaikki haavassa oleva geelijäämä on poistettava haavaa puhdistettaessa. Varsinkin syvät haavat on huuhdeltava kunnolla.

Lisätietoja BIOSORB™ geelityvän kuitusidoksen hyödyistä saat ottamalla yhteyden Systagenixin myyntiedustajaan soittamalla numeroon **020 112 1510** tai käymällä osoitteessa **systagenix.com**



Mediq Suomi Oy
Riihitontuntie 7 D, PL 115
02201 Espoo, puh. 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

Viitteet
1. Arkistoidut tiedot.

©2016 Systagenix Wound Management IP Co B.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tässä yhteydessä esitetyt tavaramerkit, ellei muutoin ole mainittu, ovat Systagenix Wound Management IP Co B.V.:n, sen tytäryhtiöiden ja/tai lisenssinantajien omaisuutta. 5746/SYS/FI/0916/Lue käyttöohjeet kokonaisuudessaan pakkauselosteesta.

KÄYTTÖTARKOITUS

BIOSORB™ -geelityvä kuitusidos on tarkoitettu kohtalaisesti tai voimakkaasti tulehdusnestettä erittävien akuuttien tai kroonisten haavojen hoitoon, mukaan lukien:

- Säarihaavat, painehaavat (vaiheet II–IV) ja diabeettiset haavat
- Leikkaushaavat (esim. leikkauksen jälkeiset haavat, jotka on jätetty paranemaan sekundaarisesti, sekä luovutuskohdat)
- Ensimmäisen ja toisen asteen palovammat
- Traumahaavat (esim. abraasiot ja laseraatiot)
- Syöpähaavat

BIOSORB™ -geelityvällä kuitusidoksella on tukea antava vaikutus, sillä se suojaa haavan reunaa ja ympäröivää ihoa maseraatiolta¹.



Tuotetta voidaan käyttää myös kompressiohoidon aikana.



BIOSORB™ -geelityvää kuitusidosta voidaan leikata helposti kuivana steriileillä saksilla.

Hyvä tietää...

In vitro-näytön mukaan BIOSORB™ -sidoksella on 43 % suurempi imukyky kuin Aquacel Extra -sidoksella¹

BIOSORB™ Gelling Fibre Dressing

Koko	Sidoksia pahvipakkauksessa	Tuotekoodi
5 cm x 5 cm	10	BGF0505
10 cm x 10 cm	10	BGF1010
15 cm x 15 cm	5	BGF1515
2 cm x 45 cm (rope)	5	BGF0245