



People.Health.Care.

Debrisoft® Pad

Paras menetelmä mekaaniseen puhdistukseen.



Debrisoft® Pad
Paras menetelmä

2 kokoa,
lukemattomia
mahdollisuuksia

Vastaus on **DEBRISOFT® PAD**

Paras menetelmä hyvästä syystä:

Debrisoft Pad koostuu patentoiduista mikrokuiduista, jotka irrottavat haavasta tehokkaasti jäänteitä, epäpuhtauksia ja eritteitä ja sitovat ne paksuun kuitumateriaaliin poistaen ne haavasta tehokkaasti, mutta hellävaraisesti. Debrisoft Pad poistaa jopa 99,9 %* biofilmistä.

Debrisoft-tyynyllä tehty puhdistus takaa:

Käytännössä kaikkien mahdollisten pintahaavojen erittäin tehokkaan mutta hellävaraisen puhdistuksen.

Taustalla tasku

► Parempi tarkkuus

Muotoillut kuitujen päät

► Tehokkaat tulokset



Ommeltu reuna + vahvistettu tausta

► Helppo käyttää

Pehmeä mikrokuiturakenne, jossa miljoonia kuituja

► Hellävarainen käyttää



Debrisoft® Pad

Ehdottomaan puhtauteen.

* Jotta biofilmin hoito onnistuisi, Debrisoft-tyynyllä tehdyn puhdistuksen jälkeen on tehtävä antimikrobinen hoito.

** Koko valikoima ei välttämättä saatavissa.

TEHOKAS joka kerta!

Debrisoft® takaa

Edut



Silminnähtäviä tuloksia nopeasti¹

Säästää aikaa ja siten myös rahaa

Puhdista haava 2–4 minuutissa



Helppokäyttöinen¹ ja välittömät tulokset

Kostuta, puhdista ja työ on valmis!

95 % hyvästä erinomaiseen

Käyttötesti



Käytännössä kivuton¹

Parempi hoitomyöntyvyys

97,4 %:lla ei kipua tai sivuvaikutuksia


Käyttötesti

Yksi hoitokerta yhdellä Debrisoft Pad -tyynyllä

Yksi hoitokerta kahdella Debrisoft Pad -tyynyllä

Ennen Debrisoft-hoitoa²

Debrisoft-hoidon jälkeen²

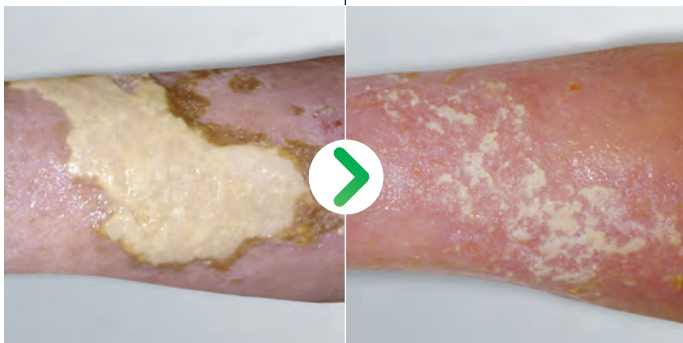

Ennen Debrisoft-hoitoa³

Debrisoft-hoidon jälkeen³



Erittäin tehokas, näkyvät tulokset.



Debrisoft® Pad
Omaa luokkaansa.

HELPPOKÄYTTÖINEN

joka tilanteessa!

Käyttöohjeet:



1. Kostuta

Debrisoft Pad puhdistaa tehokkaasti vain, kun se on kostutettu etukäteen. Debrisoft voidaan kostuttaa millä tahansa nesteellä hanavedestä antimikrobisiin haavanpuhdistusliuoksiin. Noudata valintasi mukaisesti paikallisia ohjeita.




2. Puhdista

Puhdista haava hellästi painaen tyynyn pehmeällä kuitupuolella. Puhdista tarvittaessa haavaa ympäröivä iho toisella kostutetulla Debrisoft Pad -tyynyllä.

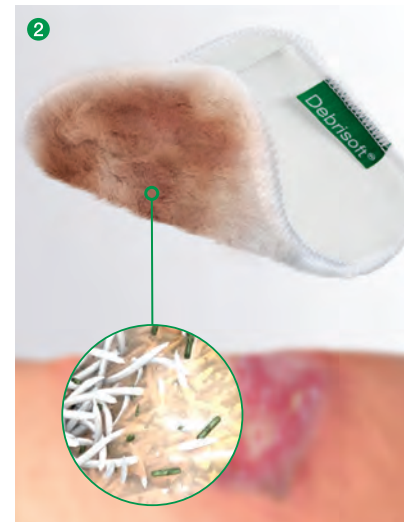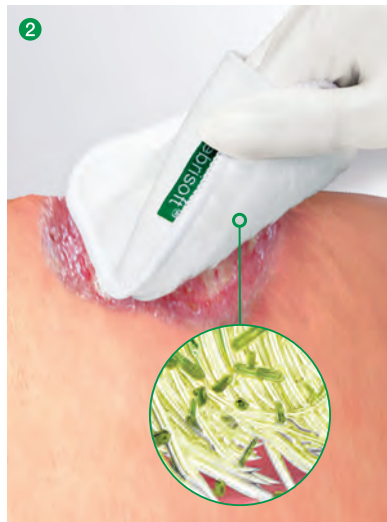

3. Valmis

Hävitä käytetty Debrisoft Pad. Huomioi aina paikalliset hävitysohjeet.

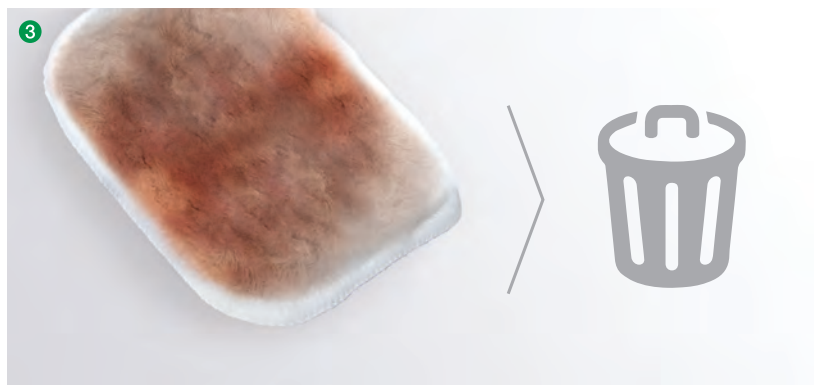

Debrisoft® Pad

Kostuta, puhdista ja työ on valmis.

TODELLA NEROKAS

Kolmitoiminen ratkaisu, joka on sekä helppo että tehokas: Debrisoft®

Oli hoidettavana syvä haava tai pintahaava, Debrisoft-valikoiman avulla voit olla varma siitä, että sinulla on aina käsillä haavan puhdistukseen parhaiten sopiva tuote.

! Kokeile Debrisoft Pad -tyynyn käyttöä kuivalle, pergamenttimaiselle, hyperkeratoottiselle, seborrooiselle tai öljyiselle iholle.

Debrisoft® Lolly

Syvien haavojen ja pintahaavojen puhdistukseen

Debrisoft® Pad*
13 x 20 cm / 10 x 10 cm

Pintahaavojen puhdistukseen



Debrisoft®
Parasta puhdistusta.

* Koko valikoima ei välttämättä saatavissa.



People.Health.Care.

Lähteet:

1) Bahr S, Mustafi N, Hättig P, Piatkowski A, Mosti G, Reimann K, Abel M, Dini V, Restelli J, Babadagi-Hardt Z, Abbritti F, Eberlein T, Wild T, Bandl K, Schmitz M. Clinical efficacy of a new monofilament fibre-containing wound debridement product. *Journal of Wound Care* (2011) 20 (5): 242–248 (Saksankielinen käännös saatavissa lähteestä: *Wundmanagement* (2011) 5: 260–266)

2) Kuvat: Barbara Pritchard, Wrexham Maelor Hospital, Wales, Iso-Britannia
3) Kuvat: Gabriele Stern, ATZ-Stern, Bocholt, Saksa

Tilauksetiedot

Debrisoft® Pad haavanpuhdistukseen Steriili, yksittäispakattu

Koko (cm)	REF	Myyntierä (kpl)
10 x 10	34 321	5/50
13 x 20*	34 323	5/50

Debrisoft® Lolly Steriili, yksittäispakattu

Koko (cm)	REF	Myyntierä (kpl)
160	33 224	5



* Koko valikoima ei välttämättä saatavissa.

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstrasse 4 · D-56579 Rengsdorf, Germany
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Vienna, Austria

Markkinoija Suomessa



Mediq Suomi Oy
Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
puh. 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

2002466 0119 fi