


Combur Test® - virtsatetestiliuskoihin ei C-vitamiini vaikuta

- TUNNETUIN
ANTIOKSIDANTTI
EI AIHEUTA
VIRHEELLISIÄ TULOKSIA

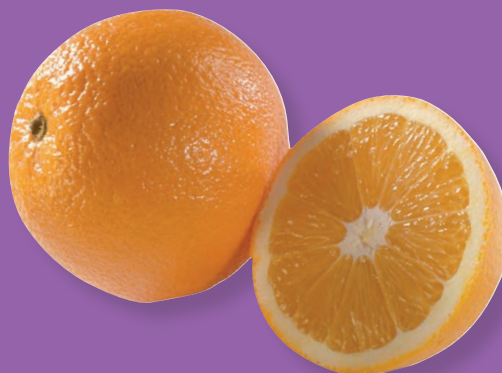

**ENSI SILMÄYKSELLÄ KAIKKI VIRTSATESTILIUSKAT NÄYTTÄVÄT SAMANLAISILTA.
TODELLISUUDESSA VIRTSATESTILIUSKOJEN EROT VOIVAT OLLA MERKITTÄVIÄ.**

C-vitamiinia on joka puolella. Nautitun ruoan, hedelmä-
mehujen ja lisäravinteiden lisäksi C-vitamiinia saadaan
runsaasti myös säilöntäaineena (E300–E304) valmis-
ruokien ja virvokkeiden mukana.

Virtsanäytteessä oleva C-vitamiini (askorbiinihappo)
voi aiheuttaa vääriä negatiivisia tuloksia hemoglobiini-
ja glukoositesteissä ja johtaa virheelliseen tulkintaan.

Rochen Combur Test®-virtsatetestiliuskat on pinnoitettu
jodaatilla, joka neutraloi askorbiinihapon virtsanäyt-
teestä. Käytännössä edes korkeilla C-vitamiinipitoi-
suuksilla ei ole vaikutusta virtsasta saatuihin glukoosi-
ja hemoglobiinitestin tuloksiin*.

** Nagel, Seiler, Hohenberger, Ziegler: Investigations of Ascorbic Acid Interference in Urine Test Strips.*

Tuote	Koko	Mediqin tuote- numero	Omi- nais- paino	pH	Leu- kosyy- tit	Nit- riitti	Pro- teiini/ albu- miini	Glu- koosi	Keto- aineet	Urobi- lino- geeni	Bili- rubini	Veri (eryt./ hb)
Combur 2 Test® LN	50	42698										
Combur 3 Test®	50	42247										
Combur 3 Test® E	50	42266										
Combur 5 Test®	100	36205										
Combur 7 Test®	100	28131										
Combur 10 Test®	100	28559										
Combur 10 Test® UX	100	66411										

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

