

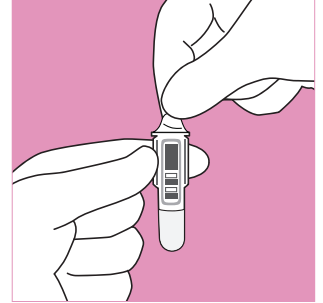
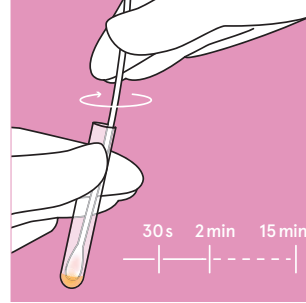
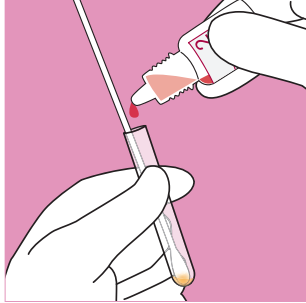
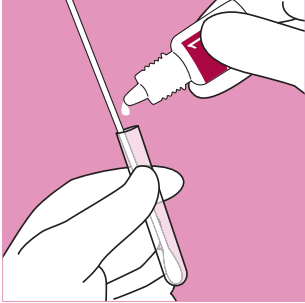
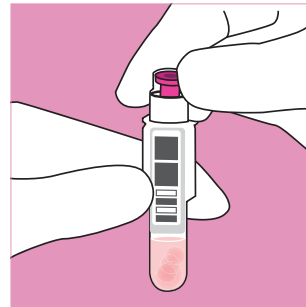


QuikRead go® Strep A

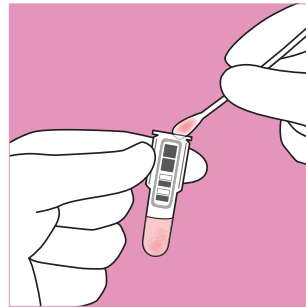



1 Ota nielunäyte testipakkauksessa olevalla näytteenottotikulla. Laita näytteenottotikku uuttoputkeen ja lisää kaksi (2) tippaa väritöntä uuttoliuosta nro 1 ja kaksi (2) tippaa punaista uuttoliuosta nro 2. Liuoksen väri uuttoputkessa muuttuu keltaoranssiksi.

2 Pyöritä näytteenottotikkua liuoksessa vähintään 30 s. Jätä tikku uuttoputkeen vielä 90 s. ajaksi. Tikku saa seistä uuttoputkessa enintään 15 minuuttia. Poista esitäytetyn kyvetin suojafolio. Vältä koskemista kyvetin alaosaan.

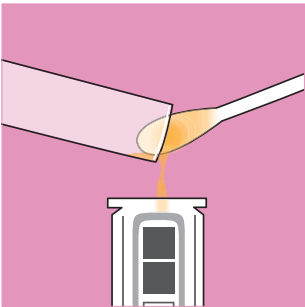

3 Siirrä uuttoputkessa oleva näyte näytteenottotikun avulla kyvettiin kallistamalla uuttoputkea. Jos uuttoputkeen jää liuosta, kaada se kyvettiin. Laita näytteenottotikku kyvettiin ja pyöritä tikkua voimakkaasti. Liuoksen väri muuttuu punaiseksi. Poista neste tikusta painamalla sitä kyvetin sisäseinämää vasten ja nosta tikku kyvetistä.

4 Sulje kyvetti huolellisesti Strep A -reagenssikorkilla. Älä paina korkin sisäosaa alas. Näyte säilyy puskurissa 4 tunnin ajan. Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä [Mittaus](#).

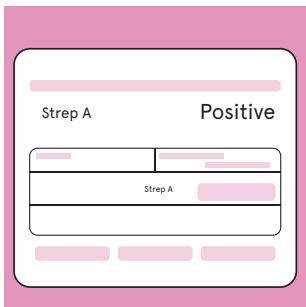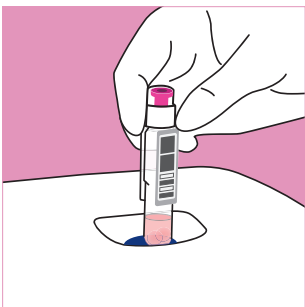

5 Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin. Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammiosta.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

QuikRead go[®] Strep A



Reagenssi-
pakkaus

Avaamaton reagenssipakkaus 2–25 °C:
reagenssipakkauksen **vanhenemispäivämäärään** saakka



Reagenssikorkit,
uuttoreagenssit
ja kontrollit

Avaamattomina säilytys 2–25 °C: **vanhenemispäivämäärään** saakka
Avattuina säilytys 2–25 °C: **12 kuukautta**



Esitäytetyt
kyvetit

Avaamattomat pakkaukset säilytys 2–25 °C: pakkauksen **viimeiseen
käyttöpäivämäärään** saakka
Foliopussin avaamisen jälkeen:
Säilytys 2–8 °C: **6 kuukautta** / säilytys 18–25 °C: **3 kuukautta**




Avattu
kyvetti


Anna puskurin lämmentä huoneenlämpöiseksi ennen testin suorittamista.
Avattu kyvetti tulee käyttää **2 tunnin** kuluessa.

Näytteenotto


Varmista, että näyte siirtyy kokonaan testiliuokseen. Näytteenottotikun pyörittäminen sekä uuttovaiheessa että siirrettäessä näytettä kyvettiin on tärkeää. Muista poistaa näyte tikusta painamalla sitä kyvetin sisäseinämää vasten ennen tikun poistamista kyvetistä.

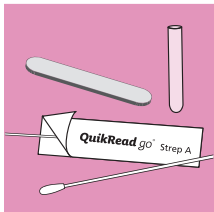


1 Tarvitset seuraavat tarvikkeet näytteen ottamiseksi QuikRead go Strep A testausta varten: QuikRead go Strep A -näytteenottotikku, kieliasta, QuikRead go Strep A -uuttoputki. Muista käyttää suojahansikkaita. Käytä näytteenottoon ainostaan QuikRead go -näytteenottotikkuja. Muiden näytteenottotikkujen käyttö saattaa johtaa väärään tulokseen.

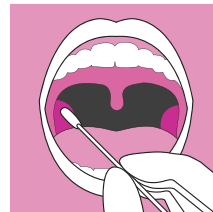

3 Kerää nielunäyte näytteenottotikulla. Ottaessasi näytettä käännä tikku edustavan näytteen varmistamiseksi. Muista ottaa näyte nielurisojen molemmilta puolilta. Vältä näytteenottoa muilta alueilta välttääksesi väärä negatiivinen tulos. Liian suuret määrät sylkeä tai limaa voivat häiritä testin suoritusta.

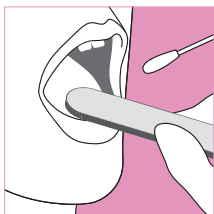

2 Poista QuikRead go Strep A -näytteenottotikku pakkauksestaan. Pyydä potilasta avaamaan suunsa. Paina potilaan kieltä alas kieliastalla.

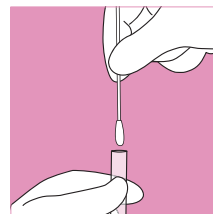

4 Kontaminaation välttämiseksi varmista, ettei näytteenottotikku kosketa suun muita pintoja, esimerkiksi poskia tai kieltä. Laita tikku QuikRead go -uuttoputkeen.

Varmista uuttovaiheen onnistuminen. Tarkkaile testiliuoksen värimuutoksia. Väri ilmaisee liuoksen oikean pH-arvon eri työvaiheissa. Noudata ohjeessa annettuja aikarajoja.

Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi

050 380 9684

Tilaukset: Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510

tai asiakaspalvelu@mediq.com

www.aidian.fi / www.quikread.com

Tuote	Tuotenro	Tilausno, Mediq Suomi
QuikRead go Strep A -reagenssipakkaus, 50 testiä	135883	1550319
QuikRead go -laite	135867	-
QuikRead go Strep A swabs, 50 kpl	153212	1703206