

# Kaiko-DryChecks

## STERILOINNIN VALVONTAAN

Kemiallinen DryChecks prosessi-indikaattori on suunniteltu kuumailmasteriloinnin tehon tarkkailuun. Indikaattoriliuska tulisi asettaa jokaiseen steriloitavaan pakkaukseen.

Standardien ISO 11140-1 luokan 3 mukainen.

### Toiminta

Helppo todeta tulos värimuutoksen kautta. Liuskan vihreä muuttuu värinsä mustaksi, kun kuumailma-steriloinnin olosuhteet ovat toteutuneet.

Värimuutos aika 160 °C asteessa on 10 minuuttia (+/- 2,5 min.).

Jokaisessa indikaattoriliuskassa on painettuna tuotannon numerosarja.



DryChecks

### Käyttö

Pese aina steriloitavat tuotteet ennen sterilointia kunkin instrumentin tai tuotteen vaatimalla tavalla.

Aseta indikaattoriliuska jokaiseen sterilointipakkaukseen tai jokaiselle sterilointitarjottimelle.

Valitse normaali sterilointiohjelma ja aja ohjelma läpi tavallisen käytännön mukaisesti.

Indikaattoriliuskan väri muuttuu vihreästä mustaksi ohjelman aikana jos sterilointiolosuhteet ovat oikeanlaiset.

Jos väri ei kuitenkaan muutu kokonaan tai väri muuttuu muuksi kuin mustaksi, tarkista että olet ajanut normaali-ohjelman. Älä käytä kuumailmasterilaattoria sterilointiin jos indikaattoriliuskan väri ei muutu täysin. Laite vaatii tällöin mitä todennäköisimmin huoltoa.

## Helppo käyttää

## Kuumailmasteriloinnin tehon tarkkailuun

## Helppo tulkinta

## Selkeä värimuutos

### Pakkaus

250 kpl/paketti.

Tuotekoodi: CI-136.

### Varastointi

Varastoi suojapussissa +10 – +38 °C lämpötilassa, normaalissa ilmankosteudessa.

Varastointiaika: 3 vuotta valmistuspäivästä.

### Myynti

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6 (PL 115), 02201 Espoo

Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

Kaiko Oy | Puhelin (09) 684 1010 | Henry Fordin katu 5 C, 00150 Helsinki | www.kaiko.fi

