

## LUMCHECK

LumCheck –testi on TOSI- testi, jonka avulla voidaan helposti todeta vaikeasti pestävien, kanyylimallisten instrumenttien pesutulos.

### TOIMINTA




Testiliuska simuloi ihmisen kuivunutta verta.

Liuska työnnetään metalliseen testiputkeen, joka kiinnitetään pesutelineeseen luer-lockilla (tai kuten muuten sijoittaisit vastaavan väli-  
neen pestäväksi).

Pesun jälkeen tulos on heti nähtävissä testi-  
liuska.

Tuloksen voi tarkistaa TOSI-tulkintaoppaasta.

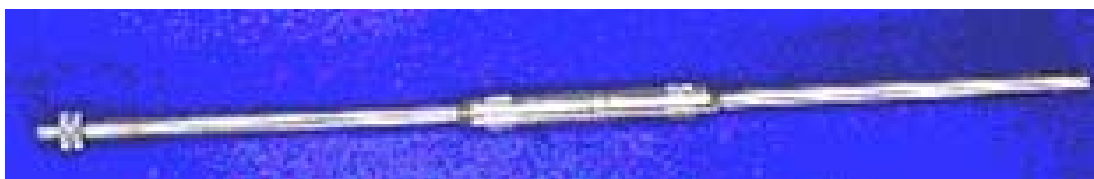

### PAKKAUS

Testi-instrumentti ja liuskat myydään eri pakkauksissa  
PEREG002P2L 1 kpl testi-instrumentti  
PEREG02 25 kpl LumCheck testiliuskoja

### VARASTOINTI

Säilytä omassa pakkauksessaan huoneen lämmössä ja avaa vasta ennen käyttöä. TOSI LumCheck on kertakäyttöinen, testiputki monikäyttöinen. Katso viimeinen käyt-  
töpäivä pakkauksesta.

Säilyvyys 1,5 vuotta valmistuspäivästä.