



PINTADESINFEKTIO

CLEANISEPT WIPES

DESINFEKTIOPYYHE



Käyttöalue	Cleanisept Wipes desinfektiopyyhkeitä käytetään lääkinnällisten laitteiden ja välineiden pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin (MDD, luokka IIa). Pyyhkeet sopivat erinomaisesti käytettäväksi myös ultraäänilaitteiden antureiden desinfiointiin (mm. Siemens, Philips, GE, Shimadzu, SonoAce, Aloka, Toshiba, Esaote, Zonare, Hitachi, Weinmann, Compumedics).		
Ominaisuudet	Cleanisept Wipes desinfektiopyyhkeet ovat nukkaamatonta kuitukangasta. Mikrobisidistä tehosta on saatavilla laajat tutkimustulokset (bakteerit, sienet (EN 13697), virukset (BVDV, vaccinia, Rota, Papova). Desinfectioaineseos on pH:ltaan neutraali ja soveltuu myös herkille materiaaleille, esim. erilaiset muovit. Tuote on dermatologisesti testattu. Pakkaus sisältää 100 kpl rullasta repäistävää kertakäyttöistä kuitukangaspyyhettä, pyyhkeen koko 14 x 20 cm.		
Käyttöohje	Muovipakkaus sisältää suljetussa pussissa olevan pyyherullan. Leikkaa halkio pussin yläsamaan ja pujota pyyherullan keskellä oleva pää muovipakkauksen kannessa olevan aukon läpi. Käyttötilanteessa pyyhe irtaava rullasta helpoiten, kun vedät pyyhettä ulospäin ja samanaikaisesti painat toisella kädellä pakkauksen kantaa kiinni. Pyyhi kontaminoitunut alue ja anna sen kuivua. Pinnan voi tarvittaessa kuivata, mikäli se on kostea vielä 1 min. jälkeen. Laita käytetty pyyhe roskiin. Desinfectioaineille herkimmat materiaalit on suositeltavaa pyyhkiä päivittäin myös vedellä tai miedolla pesuaineella kostutetulla liinalla.		
Koostumus	Didecylmethylammoniumchlorid Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid Alkylethylbenzyldiemethylammoniumchlorid		
pH	Tuotteen pH 6,5		
Varastointi	Säilytettävä alle +28°C lämpötilassa. Säilyy 3 vuotta valmistusajankohdasta. Avattu pakkaus käytettävä 6 kk kuluessa. Sulje kansi aina käytön jälkeen. Avaamattoman pakkauksen säilyvyysaika sisäpakkauksessa.		
Valmistusmaa	Saksa, valmistaja Dr. Schumacher GmbH		
Käyttö- ja ympäristö-turvallisuus	Materiaalit soveltuvat kierrätykseen. Raaka-aineet ovat ympäristömyönteisiä.		
Pakkauskoko / Tuotekoodi	12 x 100 pyyhettä, muovipakkaus	8080	EAN 42600 6862189 0
	12 x 100 pyyhettä, täyttöpakkaus	8085	EAN 42600 6862970 4
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi		



KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi