

Mepore® Film

Hengittävä, läpinäkyvä, kiinnittyvä filmisidos

Mepore kalvo on läpinäkyvä, kiinnittyvä kalvosidos, joka sopii puhtaille haavoille sidokseksi ja sekundäärisidokseksi sidoksien kiinnitykseen. Mepore kalvo on helppo asettaa paikoilleen.

Tukea antava kelmu- ja paperikehys, joka helpottaa paikalleenasettamista

Läpinäkyvä, hengittävä ja joustava polyuretaanikalvo, joka on potilaalle miellyttävä käyttää ja tarjoaa hyvän ympäristön haavan paranemiselle

Bakteereilta ja viruksilta suojaava kalvo, joka ei läpäise nesteitä

Ihoystävällinen polyakrylaattikiinnitysaine, joka kiinnittyy hellästi, mutta varmasti



Miten Mepore Film toimii

Mepore Film on joustava, läpinäkyvä ja kehon muotoihin mukautuva suoja haavalle. Sidos estää nesteiden vuotamisen sekä bakteerikontaminaation.

Mepore Film ylläpitää kosteaa haavaympäristöä haavassa. Korkean höyryn läpäisevyytensä ansiosta Mepore Film sallii ylimääräisen kosteuden poistua haavasta ja sitä ympäröivästä ihosta.

Käyttöalueet

Mepore Filmiä voidaan käyttää mukautuvaisena kiinnityssidoksena ensisijaisten sidosten kuten hydrogeelien, algiinaattien tai vaahtosidosten päällä.


Mepore Film on myös suunniteltu käytettäväksi monenlaisilla puhtailla granulaatiovaiheen haavoilla, kuten:

- Pinnalliset palovammat
- Laskimokatetrien kiinnitys
- Abraasiot eli ihonaarmut
- Laseraatiot eli ihorikkoumat
- Ihonottokohdat
- Pinnalliset painehaavat
- Suljetut kirurgiset haavat
- Estämään ihon rikkoutumista


Miten Mepore Filmiä käytetään



Vain koot 10x25 cm ja 15x20 cm: poista muotoonleikattu paperi keskeltä ja hävitä se.

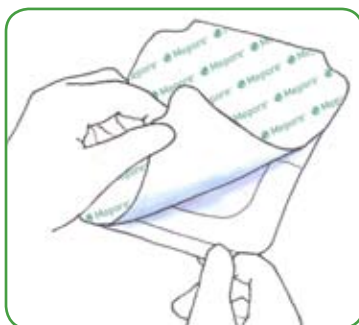

Poista suojakalvo (jossa Mepore-painatus), jolloin kiinnityspinta paljastuu.

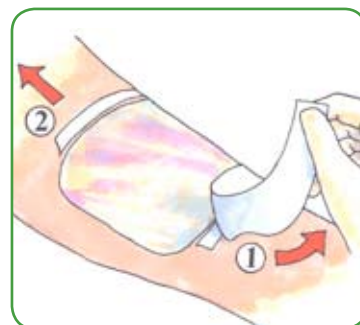

Aseta sidos paikoilleen ja silitä se hellästi iholle. Poista paperikehys. Poista sivuilla olevat kaksi paperikaistaletta. Älä venytä sidosta paikoilleen asetettaessa.

Mepore Filmin hyödyt:

- Hengittävä
- Helppo asettaa paikoilleen, myös käsineiden kanssa
- Rajoittaa uuden kudoksen vaurioitumista
- Mukautuu hyvin kehon muotoihin
- Ihoystävällinen kiinnitysaine
- Turvaa kiinnittymisen
- Ylläpitää kosteaa haavaympäristöä
- Bakteereita ja viruksia läpäisemätön kalvo, joka estää nesteiden vuotamiselta
- Nesteitä hylkivä

Huomaa

Mepore Filmiä ei tule käyttää suoraan syvillä haavoilla, jotka käsittävät lihaksia, jäniteitä, luita eikä kolmannen asteen palovammoilla. Mepore Filmiä ei tule käyttää potilailla, jotka ovat herkkiä akryliikkiinnitysaineelle.



Mepore Film on steriilisti yksittäispakattu

Tuotenumero	Koko cm	Kpl/osastopakkaus	Kpl/kuljetuspakkaus
270600	6 x 7	100	600
271500	10 x 12	70	210
272500	10 x 25	20	100
273000	15 x 20	10	50
273500	20 x 30	5	30