




One System Basic

Pyyhepakkaus

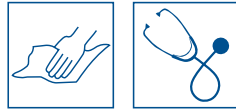

Korkean hygienian tiloihin soveltuva desinfektioaineella täytettävä kertakäyttöinen pyyhepakkaus.

Käyttökohteet

Välinehuolto, leikkausosastot, toimenpidehuoneet ja poliklinikat. Vuodeosastoilla, hammashuollon pintahygieniaan, neuvoloissa ja muissa terveydenhuollon toimipisteissä.

Yleisesti tiloissa, joissa pintadesinfektion tarve on usein toistuva.

Ammattikäyttöön.

Tuot ominaisuudet

Hygieeninen, kertakäyttöinen pussipakkaus sisältää kuitukangaspyyherullan, jossa on 120 kertakäyttöistä, tukevaa pyyhettä (repäisyrei'itys). Käyttövalmiilla desinfektioaineella kostutettuina pyyhkeet ovat tutkitusti tehokkaita jopa 28 vrk kostutuksen jälkeen. Synteettinen kuitukangas vapauttaa desinfektioaineen ja säilyttää tuotteen desinfiointitehon. Pyyhekoko 17,5 cm x 36 cm. Pakkauksessa on sanka, joka helpottaa käyttövalmiin pakkauksen kuljetusta.

Easydes Pesevän pintadesinfektioaineen ja Erisan Des Desinfektioaineen teho ja säilyvyys One System Basic-ratkaisussa on todennettu EN 16615 -testillä lähtötilanteessa ja 28 vrk kuluttua. Myös Klorilli Erikoisdesinfektioaineen ja Tevan Panox 200 Desinfektioaineen kanssa käytettäessä käyttöaika on 28 vrk.

Käyttö- ja annostusohje

Avaa pakkauksen kansi. Poista suojaava sisäkansi ja pyyhkeiden repäisyruuan peittävä suoja. Kaada 1,2 - 2,5 l käyttövalmista desinfektioaineliuosta pyyherullan päälle ja anna tasaantua 15 min. Merkitse käyttämäsi desinfektioaineen tiedot, päiväys ja täyttäjän tunnistetiedot pakkaukseen. Nosta pyyherullan keskimäinen, kohollaan oleva pyyhe repäisyaukkoon, näin saat pakkauksesta aina yhden pyyhkeen kerrallaan. Käytä suojakäsineitä desinfektioaineita käyttäessäsi.

Valmistusmaa

SAKSA

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

One System Basic pyyhkeisiin liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).

Pakkauksen koko / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
4 x 120 pyyhettä	8288	4260241964004	4260241966787

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.