




FFP2 NR

SUODATTAVA PUOLINAAMARI

Käyttöohjeet

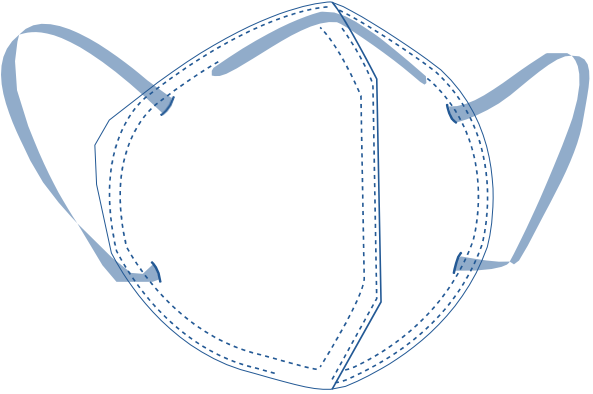

Mallinumero:

ZD-001

Käyttöohjeet

Tuotenimi: SUODATTAVA PUOLINAAMARI

Malli: ZD-001

Suodattava puolinaamari koostuu pääosin kehrumenetelmällä valmistetusta kuitukankaasta, sulapuhaltamalla valmistetusta kuitukankaasta, kuumailmasidotusta kuitukankaasta, nenäpinteestä, korvalenkeistä ja säädettävästä soljestä. Sisäänhengityksen aikana suojaimen sisäpuolinen alhainen ilmanpaine aiheuttaa ilmanvirtauksen suojaimen sisälle. Suojaimen sisäpuolinen ilmanpaine on korkeampi kuin ympäröivä ilmanpaine uloshengityksen aikana.

Käyttötarkoitukset:

Suojain on tarkoitettu suojaamaan hiukkasilta sekä kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta.

Varoitus:

1. Valitse suojaimen tyyppi ja määritä suojaimen sopivuus käyttötarkoituksen mukaan.
2. Hävitä suojaain, jos se hajoaa, aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai likaantuu.
3. Suojaain on kertakäyttöinen; älä käytä uudelleen tai useamman vuoron aikana.
4. Tarkista suojaimen kunto ennen käyttöä. Varmista, että korvalenkit ovat ehjät eikä suojaimessa ole reikiä tai muita vaurioita. Jos suojaain on vaurioitunut, älä käytä sitä, vaan vaihda suojaain toiseen.
5. Kasvojen karvoitus tai parta tiivisteen alla heikentää suojaimen tehoa.
6. Käytä suojaainta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa terveyshaittoja tai vähentää suojaimen tehoa.
7. Suojaimen teho heikkenee, jos sitä ei käytetä oikein tai jos se on vaurioitunut.
8. Älä muuta suojaainta millään tavalla.
9. Suojaain ei tuota hapetta. Käytä vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa, joissa on tarpeeksi hapetta hengittämiseen.
10. Suojaimen säilytysaika on kolme vuotta. Suojaainta ei pidä käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
11. Älä käytä suojaainta räjähdysalttiissa tilassa.

Varastointi:

1. Varastoi suojaimet paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa suojaimet kosteudelta ja valolta. Suojaa suojaimet tulelta, epäpuhtauksilta ja mahdollisilta lian lähteiltä.
2. Varastoi -20°C ja 50°C asteen välisessä lämpötilassa tilassa, jonka kosteuspitoisuus on alle 80%.
3. Säilytä suojaimet alkuperäisessä pakkauksessa kuljetuksen ajan suojataksesi niitä mekaanisilta vaurioilta ja lialta.

Käyttörajoitukset:

 Ei rajoituksia

Suojaain noudattaa asetuksen (EU) 2016/425 ja standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimuksia.

Käyttöohjeet:

1



Poista suojaain pakkauksesta ja vedä säädettävästä soljesta metallilangan tai vastaavan avulla. Aseta suojaain kasvoille niin, että

2



nenäpinne on ylhäällä (katso kuva). Aseta korvalenkit korvien taakse ja varmista, että alaleuka on peitetty. Säädä nenäpinne nenäsi

3



muotoon sopivaksi niin, että suojaain istuu mukavasti.

4



Säädä suojaain oikeaan asentoon säädettävän soljen avulla ja varmista, ettei suojaain vuoda ilmaa.

5



Istuvuus: aseta molemmat kädet suojaimen ympärille ja hengitä voimakkaasti sisään. Tämän pitäisi aiheuttaa alipaineen tunnetta. Jos suojaain vuotaa sivuilta ilmaa, asettele suojaain uudelleen.

Ilmoitettu laitos: UNIVERSAL CERTIFICATION and SURVEILLANCE SERVICES Trade Co. 2163

Ilmoitettu laitos:

Osoite: Necip Fazil Bulvari Keyap Sitesi E2 Blok No:44/84 Yukari Dudullu Umraniye/ISTANBUL– TURKKI



Kosteus rajoitus



Lämpötilaraj oitus



Suojaa kosteudelta



Suojaa auringonvalolta



Kertakäyttöinen



Katso valmistajan antamat tiedot

2163

Valmistaja:

Zhende Medical Co., Ltd.

Puh.: +86-0575-88771820

Gaobu Town, 312035, Shaoxing City, Zhejiang Province, Kiina

Gaobu Town, 312035, Shaoxing City, Zhejiang Province, Kiina Lataa EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteesta: www.zhende.com

Valmistettu: Kuukausi/vuosi

Voimassaolo: 3 vuotta

Versio: 03

Päivitetty: 451.04.10