

STEPTY™

- Ⓞ ABSORBABLE HEMOSTATIC PRESSURE DRESSING
- ⓕ IMUKYKYINEN HEMOSTAATTINEN PAINESIDE
- Ⓡ COMPRESSE ABSORBANTE À PRESSION HÉMOSTATIQUE
- Ⓢ ABSORPTIONSFÄHIGER BLUTSTILLENDE DRUCKVERBAND
- Ⓝ ABSORBEERBAAR HEMOSTATISCH DRUKVERBAND
- Ⓣ BENDAGGIO EMOSTATICO COMPRESSIVO ASSORBENTE
- Ⓤ APÓSITO COMPRESIVO HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE



Laastari tyrehdyttävällä puristustyynyllä (pistoskohdan suojaukseen)

Steriloitu etyleenioksidikaasulla

STERILI EO

Steriloitu etyleenioksidikaasulla

Valmistettu Japanissa

ⓧ Ei saa käyttää uudelleen



Erinomainen puristus ja hyvä tyrehdysteho neulan poiston jälkeen

Hyvä puristusteho saavutetaan 6 mm paksun tyynyn ja laastarin elastisten ominaisuuksien ansiosta.


Käytetään verinäytteenoton tai perifeerisen laskimokanyylin poiston jälkeen.

■ Erittely

| Tuotenumero | Koko | | | Laatikossa |
|---------------|----------------|-------------|------------|------------|
| | Laastarin koko | Tyynyn koko | Levyn koko | |
| 4987167070090 | 39 x 80 mm | 27 x 15 mm | 36 x 30 mm | 50 arkkia |

Käyttöohjeet

Irrota suojapaperi vain osittain. Aseta laastarin keskikohta ihoa vasten ja venytä noin 1 cm (kun käytössä on STEPTY P 2 cm).

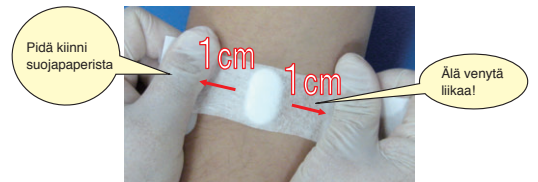

Venytä laastarin liimaosat yksitellen 1cm/siiveke.

Hygieeninen kompressio

Ominaisuudet

Laatu ja helppokäyttöisyys säästävät hoitotyöhön kuluva-aikaa.

Tyyny



Erittäin imukykyinen 6 mm paksu tyyny

- 27 mm pitkä soikea tyyny.
- Peittää ja puristaa pistokohtaa.
- Soikea muoto helpottaa ihon stimulointia.

Laastari

Erittäin elastinen ja taipuisa uretaanikuitukangaslaastari

- Hypoallergeeninen akryyliiima-aine
- Suojapaperissa on suuri irrottamista helpottava kieleke.

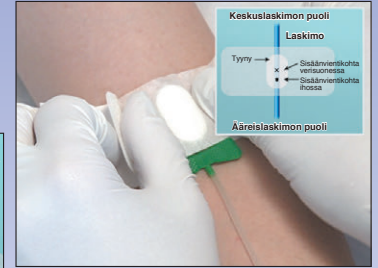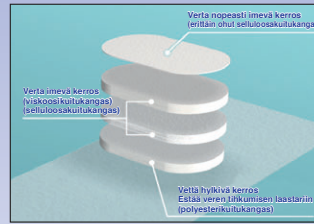


Käyttö


- Veripalvelu: ääreislaskimon puristus ja suojaus verenluovutuksen tai verenoton jälkeen.
- Sairaala, klinikka: ääreislaskimon puristus ja suojaus verenoton, verensiirron tai tiputuksen jälkeen.




Käyttöesimerkki

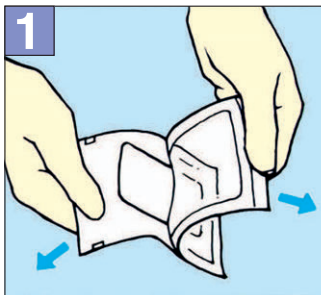


1 Avaa sterililippakaus ja ota painelaastari pakkauksesta.

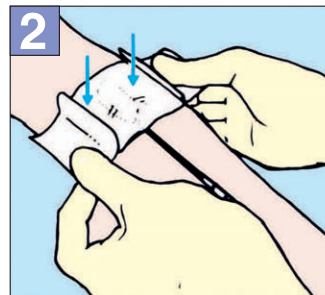


2 Kohdista laastarissa oleva haavatyyny verisuonen suuntaisesti ennen neulan poistamista ja pidä sitä paikoillaan.

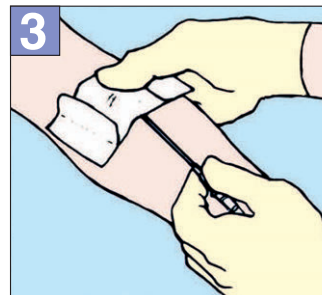

3 Pidä haavatyynyä kevyesti paikallaan ja vedä neula pois.

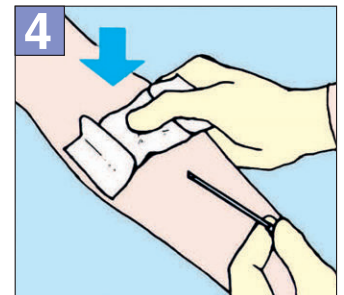


4 Pidä haavatyynyä kevyesti paikallaan ja vedä neula pois.

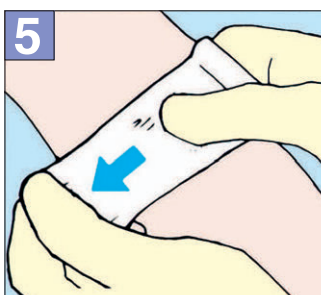


5 Venytä laastaria 1 cm leveydeltä ja kiinnitä se tukevasti ihoon.



6 Vaihda puristavaa peukaloa niin, että tyyny ei pääse liikkumaan ja jatka puristamista.

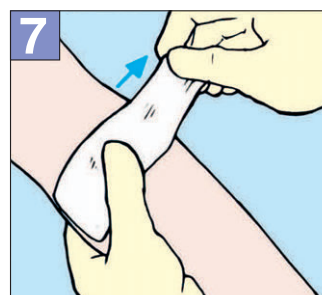

7 Kiinnitä toinen laastarin siiveke samalla tavalla

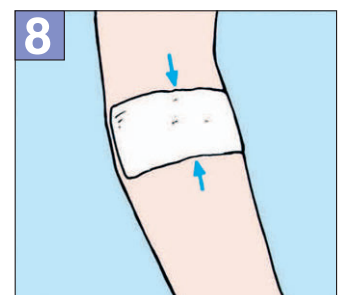

8 Stepty™ painelaastari kiinnitettyä iholle.

VAROTOIMET

- Jos haavaan tulee tuotteen käytön aikana kliininen infektio, lopeta tuotteen käyttö ja hoida infektio.
- Jos esiintyy iho-oireita (esim. ihottumaa, kuumotusta tai kutinaa) esiintyy, lopeta tuotteen käyttö ja hoida oireet.
- Irrota neula aina ennen tuotteen kiinnittämistä, jotta iho tai verisuonet eivät vaurioiduu.
- Painelaastarien pitkäkestoinen käyttö aiheuttaa liiallista jännitystä, mikä rasittaa ihoa.
- Suosittelemme painelaastarin poistamista noin 2 tunnin kuluttua sen asettamisesta.
- Varmista ennen laastarin irrottamista, että verenvuoto on loppunut. Tarvittaessa tyrehdytä verenvuoto puristamalla.

- Suojaa pistokohta.
- Jos painelaastari kastuu tai likaantuu, irrota se viipymättä ja kiinnitä tilalle uusi.
- Jos tuotteen pakkaus vahingoittuu, hajoaa tai kastuu, älä käytä tuotetta.
- Tuote on käytettävä välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.
- Ihovaurioiden välttämiseksi irrota laastari hitaasti ihoarvojen suuntaisesti.
- Ei saa käyttää uudelleen.

Tuotteen säilytys

- Säilytetään huoneenlämmössä vedeltä, korkeilta lämpötiloilta, kosteudelta ja suoralta auringonvalolta suojattuna.