

CareSens® N POP -verensokerimittari



CareSens® N POP -verensokerimittari tekee diabeteksen hoidosta entistä helpompaa. Verensokerimittauksen suorittamiseksi aseta testiliuska mittariin, tee ihopistos ja laita verinäyte, vain 0,5 mikrolitraa testiliuskalle. Valmis verensokeritulos on luettavissa valaistulta LCD-näytöltä 5 sekunnissa näytteen asettamisesta CareSens N -testiliuskalle.

Diabeteksen hoidon seurannan helpottamiseksi CareSens N POP -mittarissa on aterian jälkeinen merkintätoiminto sekä aterian jälkeinen hälytystoiminto. Mittarin muistista voidaan hakea helposti 1, 7, 14, 30 ja 90 päivän keskiarvotulokset. USB-portin kautta mittari voidaan liittää tietokoneeseen ja tuloksia voi käsitellä helppokäyttöisellä **SmartLog-ohjelmalla** tai uudella **SmartLog-mobiilisovelluksella**.

Luotettavien verensokerimittaustulosten varmistamiseksi CareSens N POP -verensokerimittarissa on käytetyn testiliuskan tunnistustoiminto sekä vanhentuneen testiliuskan hälytystoiminto. Mittariin voidaan asettaa myös hälytystoiminto liian matalasta verensokerimittaustuloksesta.

Mittausalue 1,1-33,3 mmol/l. Muut sokerit kuten maltoosi ja ksyloosi eivät häiritse mitattuja tuloksia. Mittarissa on muistipaikat 1000 mittaustulokselle.



- Uusin 15197:2013-standardi 100 %
- Ei koodausta
- Hellävarainen, näytemäärä vain 0,5 mikrolitraa
- Lyhyt mittausaika 5 sekuntia
- Liuskojen säilyvyys 24 kuukautta, myös avattu pakkaus
- Smartlog-ohjelma
- Hyvät hälytys- ja hoidonseurantatoiminnot
- Käytetyn testiliuskan tunnistus sekä vanhentuneen testiliuskan hälytystoiminto



Lyhyt mittausaika

Ei koodausta



Pieni näytemäärä

Verensokerin mittaaminen Care Sens® N POP -mittarilla

- Ei koodausta; laita vain liuska mittariin ja olet valmis testaukseen
- Pieni näytemäärä 0,5 µl
- Tulos 5 sekunnissa, ilman ylimääräistä koodausta tai näytteen lisäämistä



1 Aseta testiliuska



2 Lisää verinäyte



3 Tulos on luettavissa 5 sekunnissa valaistulta näytöltä



TUOTENUMEROT

Mediğin tuotenumero	Tuote	Pakkaus-koko
1230666	CareSens N -verensokeritestiliuskat	50 kpl
1230667	CareSens N -kontrolliliuos A ja B	1 kpl
1231042	CareSens tiedonsiirtokaapeli FTDI	1 kpl
1230724	CareSens N POP -verensokerimittari aloituspakkaus	1 kpl


LUOTETTAVAA JA TESTATTUA TARKKUUTTA

- Ainutlaatuinen automaattinen koodausmekanismi
- Muut sokerit (maltoosi, laktoosi, galaktoosi tai ksyloosi) eivät häiritse verensokerin mittausta

HYÖDYLLISET TOIMINNOT

- Hälytystoiminto matalasta verensokerista (hypoglykemia)
- Hälytystoiminto aterian jälkeisestä mittauksesta
- Hälytystoiminto vanhentuneesta testiliuskasta
- Selkeä, valaistu LCD-näyttö

CLINICAL PERFORMANCE

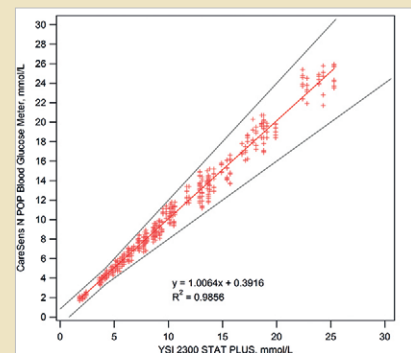

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi