

Promisemed kantapäänlansetin käyttöohje

Älä käytä, jos pakkaus on auki tai vaurioitunut.

Poista lansetti läpipainopakkauksesta.

Irrota lansetin suoja- ja pidike.

Pisto kantapäähän tehdään sivuille, jotta pisto ei osu luuhun. Etusormella (+keskisormella) ja peukalolla muodostetaan ympyrä kantapään ympärille ja painellaan vähintään 3 kertaa.

Steriloi vaadittu paikka, pidä kiinni vastasyntynyt kantapäästä ja kohdista lansetti steriloidulle kohdalle, paina sitten painiketta hiukan.

Hävitä lansetti jäteastiaan.

Pyyhi ensimmäinen veripisara steriloidulla kuivalla vanulla ja ota sitten riittävä verinäyte.

Varoitukset:

Tämä kantapäänlansetti on tarkoitettu vain kerran käytettäväksi.

Älä käytä lansettia viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Vain koulutetut ammattilaiset voivat käyttää lansettia.

Älä toista näytteitä samasta kohdasta, valitse vähintään 2 mm:n etäisyys viimeisestä pistokohdasta.

Älä ota näytettä kohdasta, jossa on tulehdusta tai turvotusta.

Älä ota näytettä kohdasta, jossa vastasyntyneellä on ihosairaus tai haava.