

DiaSpect Tm

Hemoglobiinin ja hematokriitin*
tulokset välittömästi

TARKKA JA NOPEA!



DiaSpect Tm mittaa veren hemoglobiinipitoisuuden kapillaari- tai laskimo-verestä (antikoagulantit EDTA ja hepariini) ja lisäksi hematokriitin. Järjestelmä koostuu kahdesta osasta: kertakäyttöisestä mikrokyyvetistä ja tehdaskalibroidusta analysaattorista. Kyvetit eivät sisällä mitään reagenssia ja tästä johtuen niillä on pitkä säilyvyysaika 30 kk. Tuloksen laite antaa välittömästi, sekunnissa. Automaattinen self-check mittausten välillä, ei ylläpitohuoltoja.

- Tehdaskalibroitu ICSH-referenssimenetelmää vastaan (HiCN)
- Testitulos välittömästi!
- Testikyveteillä pitkä säilyvyys, valmistuksesta 2,5 vuotta!
- Laite on heti käyttövalmis, "always-on"-teknologia
- Automaattinen self-check mittausten välillä
- Akkukäyttöinen. Akun käyttöaika jopa 40 päivää tai 10 000 testiä
- USB 2.0- tai Bluetooth-liitettävyyttä
- Näyte: sekä kapillaari- että laskimoveri (EDTA tai Heparini)
- Mittausalue 5-255 g/L
- Laajaspektrinen fotometrinen mittaus
- Näytemäärä 10 µl
- Mitat: 150 x 90 x 40 mm

UUTUUTENA:

- EKF Link välitieto-ohjelma USB:n ja Bluetoothin kautta
- LIS-yhteys*
- Hematokriitti*
- 4000 sisäistä muistipaikkaa
- Muistutus kontrollista*
- Potilastietohallinta ja potilaan tunnistus*
- Operaattorin tunnistaminen*

*merkityt saatavilla liittämällä DiaSpect Tm EKF Link:in tai EKF Liteen.



1. Ota verinäyte.



2. Aseta täytetty kyvetti ja paina kevyesti. Poista kyvetti välittömästi ensimmäisen piippauksen jälkeen.



3. Valmis tulos on luettavissa heti.

Mediqn tuotenro	Tuote	Pakkausko
40024319	Diaspect Tm -analysaattori	1 kpl
40015104	Testikyvetit	100 kpl
40014758	Kolmitasokontrolli (low/medium/high)	3 x 1,9 ml

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

EKF
DIAGNOSTICS



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

DiaSpect
Medical GmbH

10/2023