




# Descoton 2% GDA

## Desinfektioaine

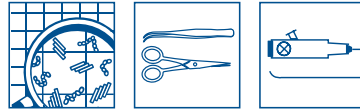

Käyttövalmis, materiaalimyötäinen, mikrobisidisesti erittäin laajakirjoinen ja nopeavaikutteinen aktivoitua 2 % glutaarialdehydiä sisältävä desinfektioaine.

### Käyttökohteet

Terveydenhuollon ammattikäyttöön: Liotusdesinfektio instrumenteille ja tähytimille. Erityisen herkän välineistön/materiaalin desinfiointiin: mm. hammashuoltoon proteettisille töille, kumi- ja muovivälineistölle, kirurgisille instrumenteille, jäykille ja taipuisille endoskoopeille sekä endoskopiavälineistölle, optiikoille, TEE-anturien desinfiointiin.

Ammattikäyttöön.

### Tuoteominaisuudet

Saksalaisen Dr. Schumacher GmbH:n valmistama käyttövalmis glutaarialdehydiin perustuva desinfektioaine puhdistettujen instrumenttien ja välineistön desinfiointiin.

Tutkimuksia: Dr. Brill, Hamburg: Examination of the bactericidal and fungicidal disinfection effectiveness, Expert report on the effectiveness against Mycobacterium terrae.

Dr. Steinmann, Virologist, Bremen: Expert report on Hepatitis C virucidal activity (BVDV). Expert report on Vaccinia virucidal activity.

Prof. Werner, Schwerin: Expert's report on sporicidal activity (Clostridium difficile).

### Käyttö- ja annostusohje

Pese instrumentit/välineet ennen niiden desinfiointia.

Pestyt välineet upotetaan desinfektioaineeseen, kannelliseen liotusastiaan. Huomioi, että desinfiointavat instrumentit peittyvät kokonaan ja aine pääsee vaikuttamaan mahdollisiin kanaviin, sisäosiin ja kaikille pinnoille.

Instrumenttidesinfiointiossa vaikutusaika (kontaktaika) vähintään 5 min. Itiöteho saavutetaan 45 min vaikutusajalla. Vaikutusajan päätyttyä välineet huuhdotaan (puhdas vesijohtovesi/steriili aqua) ja kuivataan huolellisesti. Samaa desinfektioainetta voidaan käyttää vuorokauden ajan, mikäli liuos on silmämääräisesti puhdas. Vaihda likaantunut liuos.

### Huomioitavaa

Noudata laitevalmistajien erikoisohjeistuksia.

Hammashuollon alginaattimateriaalit: soveltuvuus rajoitettu. Lisätietoa KiiltoCleanin puhtaus- ja hygienia-asiantuntijalta.

### Koostumus

#### Tehoaine

#### Vaikutus

Glutaarialdehydi

2 %

Biosidinen tehoaine

### Tuotteen pH

5.0 hapan

### Varastointi

Huoneenlämmössä 3 v.

### Valmistusmaa

SAKSA

### Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

**Pakkauskoko /  
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN**

3 x 5 l

8130

4260241965247

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiiltoclean.com](http://www.kiiltoclean.com) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiilto.com](mailto:asiakaspalvelu@kiilto.com).

Markkinoija Suomessa

**Mediq Suomi Oy**

Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo  
puh. 020 112 1510  
[asiakaspalvelu@mediq.com](mailto:asiakaspalvelu@mediq.com), [www.mediq.fi](http://www.mediq.fi)