



## Tiedottava ilmoitus

Kiilto Pro Erisan Des pintadesinfektioaine välineille ja pinnoille (8126) 500 ml & (8127) 3 L

Kiilto Pro Erisan Des tuotteen etiketissä on havaittu virhe. Käyttö- ja laimennusohjeissa **ultraäänipesulaitteessa** on käytettävän veden määrä ilmoitettu väärin.

Oikea laimennussuhde on:

2% liuos = 20 ml Erisan Des liuosta ja 980 ml vettä.

5% liuos = 50 ml Erisan Des liuosta ja 950 ml vettä.

Virhe tullaan korjaamaan seuraavassa etikettierässä.

Virhe on havainnollistettu alla esitetystä kuvasta.

Instructions for use: / Käyttö- ja laimennusohjeet: / Bruks- och utspädningsanvisningar:					
	%	ERISAN DES	water / vesi / vatten		
Surface disinfection Pintadesinfektio Ytdesinfektion	2	10 ml	490 ml	1 min	rinse if needed / huuhdellaan tarvittaessa / skölj vid behov
Spillage disinfection Eritetähdadesinfektio Desinfektion av sekretfläck	2	10 ml	490 ml	1 min	2-phase disinfection / 2-vaiheinen / 2-stegs desinfektion
Instrument disinfection Välinedesinfektio Instrumentdesinfektion	2	20 ml	980 ml	3 min	rinse / huuhdellaan / skölj
• Norovirus • Drill bits / Poranterät / Borr	5	50 ml laimentamatta / outspädd / undiluted	950 ml	3 min	rinse / huuhdellaan / skölj rinse / huuhdellaan / skölj
Ultrasonic washer Ultraäänipesulaite Ultraljudstvätt	2	20 ml	950 ml	30 min	rinse / huuhdellaan / skölj
	5	50 ml	980 ml	30 min	

**Kristiina Helminen**

Solutions Manager

Terveysthuolto

+358 40 745 4725

[kristiina.helminen@kiilto.com](mailto:kristiina.helminen@kiilto.com)