

DERMABOND™ Topical Skin Adhesive

Haavan hoito, kun haavaa on suljettu DERMABOND™ Topical Skin Adhesive -iholiimalla^{1,2}

DERMABOND™ on steriili, nestemäinen iholiima, joka pitää haavan reunat yhdessä. Se muodostaa kalvon, joka pysyy yleensä paikallaan 5-10 päivän ajan, minkä jälkeen se lähtee itsestään irti iholta.

Seuraavassa vastataan muutamiin käyttäjien kysymyksiin ja annetaan ohjeita haavan asianmukaista hoitoa varten sen paranemisen aikana.

Tarkista, miltä haava näyttää.

- Haavat aiheuttavat aina jonkinasteista turvotusta, punaisuutta ja kipua, mutta nämä oireet yleensä häviävät haavan parantuessa. Jos turvotus, punaisuus tai kipu lisääntyy tai jos haava tuntuu lämpimältä kosketettaessa, käänny lääkärin puoleen. Käänny myös lääkärin puoleen, jos haava avautuu tai haavan reunat erottuvat toisistaan.

Pidä huolta sidosten kunnosta.

- Jos haavasi päälle asetetaan sidos, pidä sidos kuivana.
- Kun sidos vaihdetaan, älä aseta teippiä suoraan DERMABOND-liiman päälle, koska myöhemmin teipin poistamisen yhteydessä myös kalvo voi irrota.



Vältä paikallista lääkitystä.

- Älä käytä neste- tai salvalääkkeitä tai muita tuotteita haavan hoitoon DERMABOND-liiman ollessa haavan päällä. Muuten kalvo voi irrota, ennen kuin haava on parantunut.

Pidä haava kuivana ja suojattuna.

- Aseta tarvittaessa puhdas, kuiva sidos haavan päälle sen suojaksi.
- Voit välillä kastella haavaa hetken ajan suihkussa tai kylvyssä. Älä liota tai hankaa haavaa äläkä käy uimassa, jos haava ei ole täysi parantunut. Vältä voimakasta hikoilua, kunnes DERMABOND-liima on lähtenyt itsestään irti.
- Kuivaa haavaa varovasti pehmeällä pyyhkeellä suihkussa käynnin tai kylpemisen jälkeen. Jos käytät suojaavaa sidosta, aseta uusi, kuiva sidos haavan päälle äläkä anna teipin koskea DERMABOND-liimaan.
- Suojaa haava, jottei se vaurioitu ja jotta iho saa parantua rauhassa riittävän pitkään.
- Älä raaputa, hankaa tai nypi DERMABOND-kalvoa. Muuten kalvo voi irrota, ennen kuin haava on parantunut.
- Suojaa haava pitkäaikaiselta auringonvalolta tai rusketusvaloilla altistumiselta kalvon ollessa haavan päällä.

Jos sinulla on kysyttävää tai olet huolestunut jostain tähän tuotteeseen liittyvästä seikasta, käänny lääkärin puoleen.

Viite:

1. DERMABOND ADVANCED® Topical Skin Adhesive Instructions for Use. Ethicon, Inc.
2. DERMABOND® Mini Topical Skin Adhesive Instructions for Use. Ethicon, Inc